



Hinweis: NEOJECT® PLUS SAFETY Kanülen sind mit anderen Luer oder Luer-Lock Spritzen nicht kompatibel.

## Der effektive Schutz vor Stichverletzungen!

### Gebrauchsanweisung

**1** Medikament mit Standard-Kanüle aufziehen und Kanüle wieder entfernen

**2** Safety-Kanüle der gewünschten Größe fest aufstecken  
(Hinweis: Schutzkappe der Kanüle kann nur nach Verbindung mit der Spritze entfernt werden)




**3** Injizieren



**5** Spritzenkolben mit Kanüle zurückziehen



**4** Sicherheitssystem aktivieren:  
Spritzenkolben fest bis zum Anschlag durchdrücken

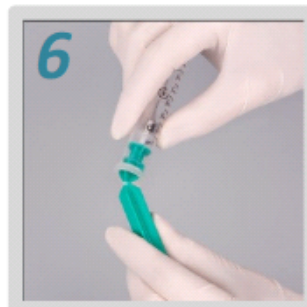

**6** Kolben abbrechen und entsorgen