

# EINLEGEN UND AUSWÄHLEN DER PERFUSORSPRITZE

## Vorbereitung der Spritze

- Füllen Sie die Spritze mit dem Medikament, entfernen Sie die Luftblasen und verbinden Sie die gefüllte Spritze mit einer passenden Perfusorleitung. Diese entlüften.



## Gerät einschalten und Spritzenhalter vorbereiten

- Schalten Sie den Perfusor Space ein.
- Ziehen Sie den Kolbenfänger (Kolbenmitnehmer) nach hinten und öffnen Sie die Halterung für den Spritzenzylinder.

## Spritze einlegen

- Zuerst den Spritzenzylinder in die Backen einsetzen.
- Dann den Kolbenfänger an den Kolben schieben, bis er einrastet.



## Spritze im Menü bestätigen (B. Braun OPS)

- Das Gerät erkennt die Spritze automatisch.
- Wählen Sie im Display den Sprizentyp „B. Braun OPS 50ml“ aus der Liste aus und bestätige mit „OK“.
- Kontrollieren Sie, ob Volumen und Hersteller korrekt angezeigt werden.

Kolbenmitnehmer schließt automatisch und fährt in Position.



## Rate eingeben und Start

- Geben Sie die gewünschte Flussrate (ml/h) ein. Optional: Zielvolumen oder Bolusrate einstellen.
- Verbinden Sie die Leitung mit dem Patienten und starte die Infusion mit der „Start“-Taste.

