

# SICHERE ANWENDUNG SAFETY KANÜLE

## 01. Auspacken der Kanüle

Alle Kanülen sind beim Entpacken mit einer Schutzkappe versehen. Öffnen Sie die Schutzfolie ohne den Luer Lock Anschluss zu berühren



## 02. Ausrichtung Schliffauge

Kanüle und Safety Verschluss sind nicht voneinander lösbar und schliffforientiert montiert. Befindet sich der Safety Verschluss über der Spritze (rastet leicht ein) so ist auch das Schliffauge nach oben gerichtet.

## 03. Anwenden am Patient

Nach erfolgter Desinfektion führen Sie die Punktion gemäß Ihrer hausinternen Vorgabe durch. Ziehen Sie die Nadel aus der Haut zurück und bedecken Sie dabei die Punktionsstelle mit einem Tupfer.



## 04. Aktivierung des Sicherheitsmechanismus

Führen Sie die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus unmittelbar nach der Anwendung und abgewandt vom eigenen Körper sowie von Dritten durch.

## 05. Durchführung

Umfassen Sie die Spritze mit der kompletten Hand, und schieben Sie mit dem Daumen den Sicherheitsverschluss so weit nach vorne bis Sie einen Klick spüren und hören.

