

SICHERE ANWENDUNG SPÜLSPRITZE

01. Dichtung lösen

Um den Kolben leichtgängig zu machen, bei verschlossener Kappe Kolben leicht nach hinten ziehen um Dichtung zu lösen.



02. Kappe abschrauben

Dabei darauf achten Luer Anschluss nicht zu kontaminieren.

03. Entlüften der Spritze

Luer Lock Anschluss nach oben halten, Kolben langsam drücken um Luft aus der Spritze zu entfernen.



04. Verbinden mit vaskulärem Zugang

Dabei darauf achten, dass keine Berührungskontamination mit der Verbindung erfolgt. Sichere Verbindung herstellen.

05. Sanfter Druck

Spritzenkolben drücken um erforderliches Volumen zu injizieren gemäß den Richtlinien der Einrichtung. Lösung langsam injizieren, um Überdruck zu vermeiden. Falls Widerstand am Kolben auftritt, keine Kraft aufwenden.



06. Entsorgung

Nach Gebrauch gemäß den anerkannten Entsorgungsverfahren der Einrichtung entsorgen.