

Spritzenkompatibilität auf einen Blick

INFUJECT® & PERFUJECT® — kein Umstellen der Pumpe nötig

Pumpeneinstellung bleibt unverändert. Lief die **Fresenius-Spritze** → **INFUJECT®**. Lief die **B|Braun OPS-Spritze** → **PERFUJECT®**.

Substitutions-Logik

Bisher	→	Dispomed-Ersatz	Pumpe	Pumpeneinstellung
Fresenius Medical Heparin 30 ml	→	INFUJECT® 30 ml Luer-Lock REF 22030	unverändert	„Fresenius 30 ml Heparin“
Fresenius Kabi AG Injectomat 50 ml	→	INFUJECT® 50 ml Luer-Lock REF 22050 · 22054 · 22064	unverändert	„Fresenius Kabi 50 ml Injectomat“
B Braun Original Perfusor Spritze (OPS) 50 ml	→	PERFUJECT® 50 ml Luer-Lock „Typ P“ REF 22051 · 22052 · 22063 · 22053	unverändert	„B Braun OPS 50 ml“

Freigegebene Pumpen-Hersteller (Auszug)

INFUJECT® 30 ml REF 22030 · Setting: <i>Fresenius Medical Heparin</i> • ALARIS: GS, GH(+), CC(+), Asena, IVAC P1000-3000 • IVAC: 1000–7000, PCA, PCAM, P4000* • TERUMO: TE-311 bis TE-372 • FRESENIUS: Pilot A2/C/Delta, Orchestra DPS(+), Injectomat Agilia (alle) • B BRAUN: Perfusor, compact (S/+), Space (+) • Dialyse: Fresenius 4008/5008/Genius, Prometheus, Nikkiso, Prismaflex • Weitere: ASCOR*, MEDIMA, MEDIPAN*	INFUJECT® 50 ml REF 22050 · 22054 · 22064 · Setting: <i>Fresenius Kabi Injectomat</i> • ALARIS: GS, GH(+), CC(+), Asena, IVAC P1000-3000 • IVAC: 1000–7000, PCA, PCAM, P4000* • TERUMO: TE-311 bis TE-372 • FRESENIUS: Pilot A2/C/Delta, Orchestra DPS(+), Injectomat Agilia, S, 50, C-IS/CP-IS • B BRAUN: Perfusor, compact (S/+), Space (+) • Weitere: ASCOR*, MEDIMA, MEDIPAN*	PERFUJECT® 50 ml „Typ P“ REF 22051 · 22052 · 22063 · 22053 · Setting: <i>B Braun OPS</i> • ALARIS: GS, GH(+), CC(+), Asena, IVAC P1000-3000 • IVAC: 1000–7000, PCA, PCAM, P4000* • TERUMO: TE-311 bis TE-372 • FRESENIUS: Pilot-Reihe, Orchestra DPS(+), Injectomat Agilia, C-PS/CP-PS • B BRAUN: Perfusor, compact (S/+), Space (+), Secura (FT/µl/P), F, VII, M(e/1), ED(2/L/L2), FM, OMNI • Weitere: Clinico Syritrol 12, MEDIMA, MEDIPAN*, Gambro Prismaflex
---	--	---

*sofern entsprechendes Setting am Gerät hinterlegt — vollständige Modellliste siehe ausführliche Kompatibilitätsübersicht bzw. Original-Declaration EN 39-2025.